


UTILISATION DE L'INCUBATEUR DE TRANSPORT DRÄGER TI500

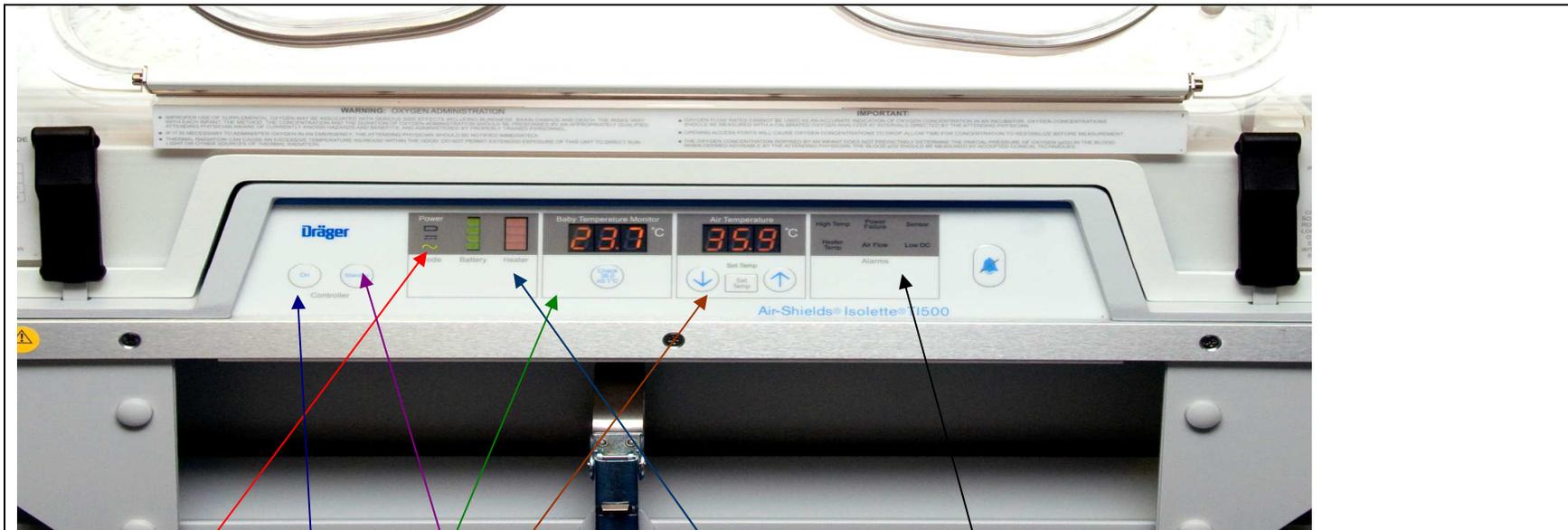

Mise en fonction de l'incubateur

1. S'assurer que le cordon d'alimentation est bien en place. Que l'interrupteur AC Power est sous tension. Le témoin AC Power Mode s'allumera (petite **vague**) lorsque le cordon d'alimentation électrique est débranché l'incubateur bascule automatiquement sur le mode piles.
2. Assurez-vous que les fentes d'air aux extrémités de l'incubateur ne sont pas obstruées
3. Effectuer un test de vérification
 - Appuyer sur **ON** pour mettre l'incubateur sous tension (à l'avant à gauche lorsque vous êtes face à l'incubateur) si l'incubateur est déjà en fonctionnement appuyer sur **Standby** pour le mettre hors tension puis sur **ON**.
 - L'appareil effectue un test automatique d'environ 7 secondes. Tous les témoins lumineux apparaissent, à la fin du test un court «bip» se fait entendre.
4. La commande **Set Temp**, les voyants du témoin Set Température s'allument. Appuyer et maintenez la touche avec la flèche vers le haut ou le bas enfoncée jusqu'à ce que l'affichage indique la température désirée. Si aucune température n'est sélectionné, par défaut l'incubateur affichera 36°C.
5. **Air Temperature °C** (température de l'air ambiant) indiquera le degré à l'intérieur de l'incubateur. À plus ou moins 0,5°C.
6. Lorsque la température est atteinte, le nombre de voyants lumineux du témoin **Heater** (élément chauffant) ne dépassera pas deux.
7. Placer la perle de température sur l'abdomen du bébé. À mi-chemin entre le xiphoïde et le nombril. Utilisez un collant CareForMe™ pour retenir la sonde au bébé. Cf. p.5-24
8. Au besoin administrez un surplus d'oxygène en reliant depuis une source d'oxygène. Connectez la sortie du débitmètre d'oxygène au raccord du connecteur d'entrée d'oxygène. (Lorsque vous êtes face à l'incubateur côté gauche) Cf. p.5-28
Régler la concentration en oxygène voir le guide sur l'incubateur.
9. Au besoin vous pouvez obtenir de l'humidité. Il suffit d'humidifier l'éponge située sous le plateau contenant le matelas.
Vous devez détacher le harnais. Mouillez le coussin avec 400 ml d'eau distillée stérile. (dure 12 heures) Usage unique. Cf. p.5-29



BOUTON POUR METTRE L'INCUBATEUR EN MODE BATTERIE
Lorsque vous branchez l'incubateur et qu'il ne bascule pas en mode électrique. Le bouton est peut-être en mode batterie. Il s'agit de le mettre en position Off en appuyant dessus

Éponge (Usage unique) pour humidifier l'air ambiant. Il suffit d'ajouter 500mL d'eau distillé.