



Évacuations aéro-médicales

Procédure d'utilisation de la plaque
femelle d'arrimage de l'incubateur
Dragër sur la civière IT Stryker

Pourquoi utiliser une interface entre la civière Stryker et l'incubateur Dragër?

- À l'intérieur de l'avion, un système de fixation a été approuvé afin de retenir l'incubateur.
- Ce système requiert une modification de l'incubateur.
- La plaque sert d'interface afin de permettre l'arrimage de l'incubateur transformé sur la civière Stryker même si celui-ci a été modifié.


La civière Stryker avec système pour arrimer l'incubateur Dragër



Systeme de fixation d'origine pour l'incubateur Dragër

Systeme barré

Systeme débarré

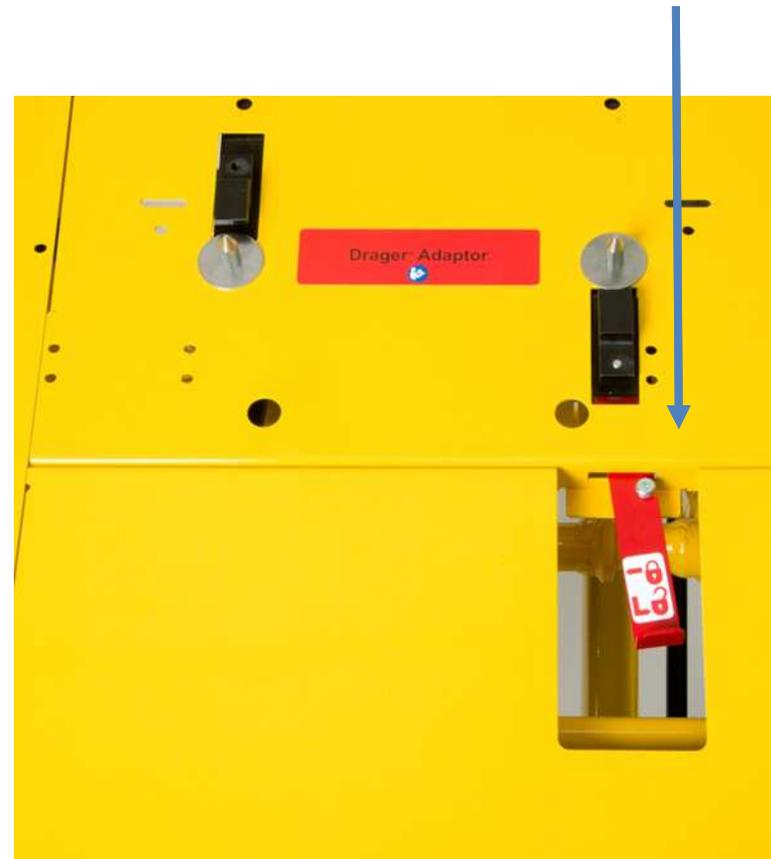

- Étape 1

Fixation de la plaque sur la civière Stryker


Débarrer puis déposer la plaque sur la civière



S'assurer que les gouttières
d'arrimage soient sur le dessus



La plaque ne doit pas dépasser la
civière

Mécanisme qui maintiendra la plaque en place sur la civière

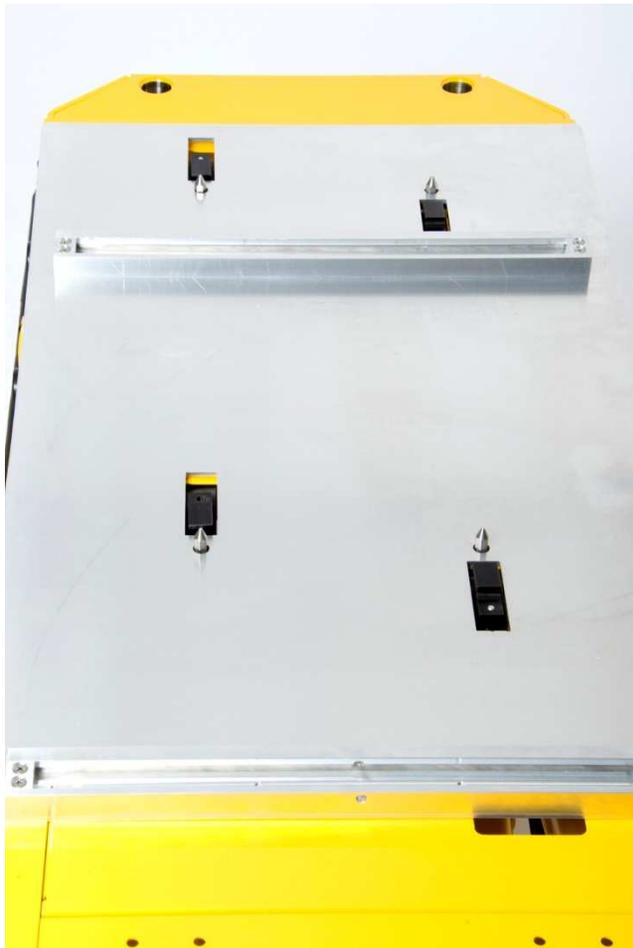

Lorsque la plaque est en place sur la civière, elle rend inaccessible le système prévu pour barrer le mécanisme de retenu. Vous devez utiliser la planche sous la civière.


et vous assurer que tout est bien fixé en essayant de déplacer la plaque d'interface.

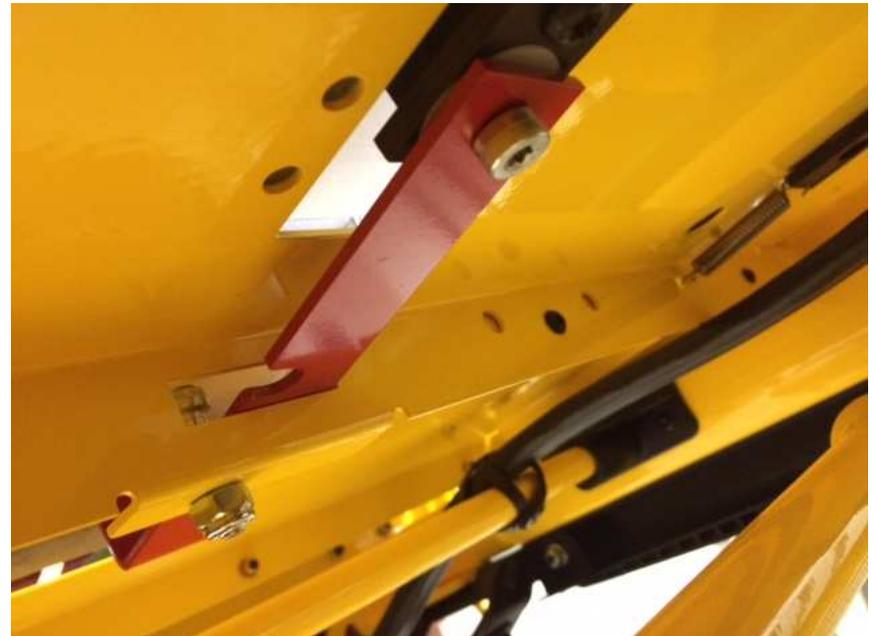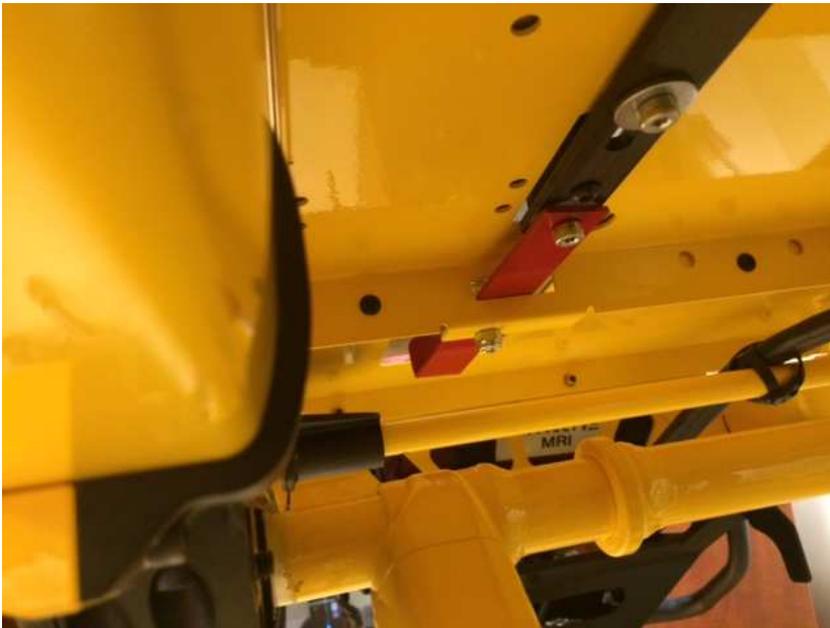


- Étape 2

Fixation de l'incubateur sur la plaque


Déposer l'incubateur sur la plaque en vous assurant que les gouttières en forme de «L» de chaque côté soient insérées dans les gouttières sur la plaque

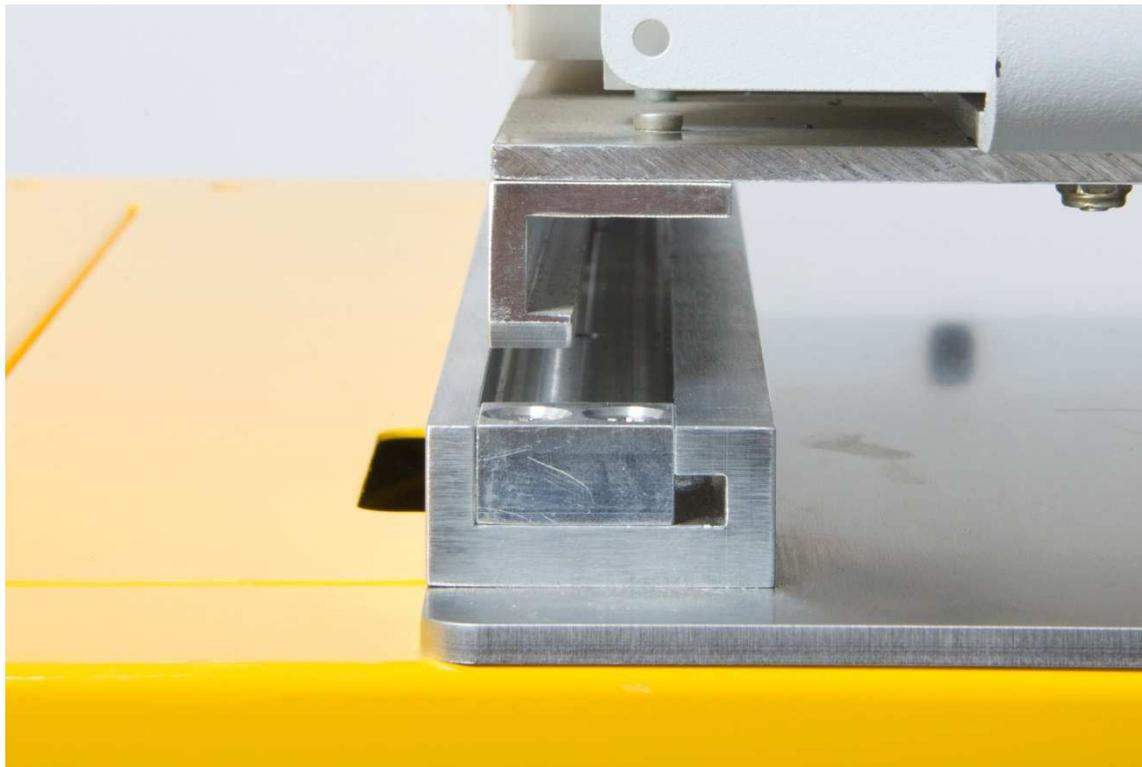

Lorsque l'incubateur est déposé, se tenir face à celui-ci et le glisser vers la droite

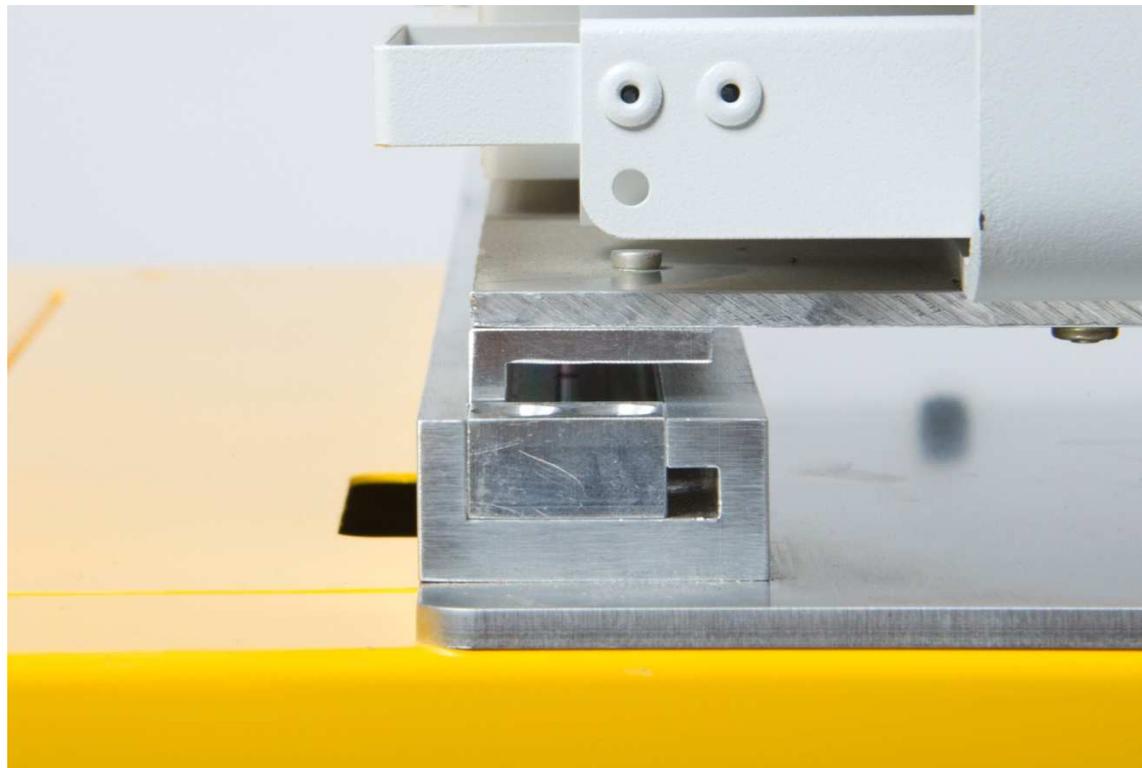


Vous remarquerez un espace à gauche

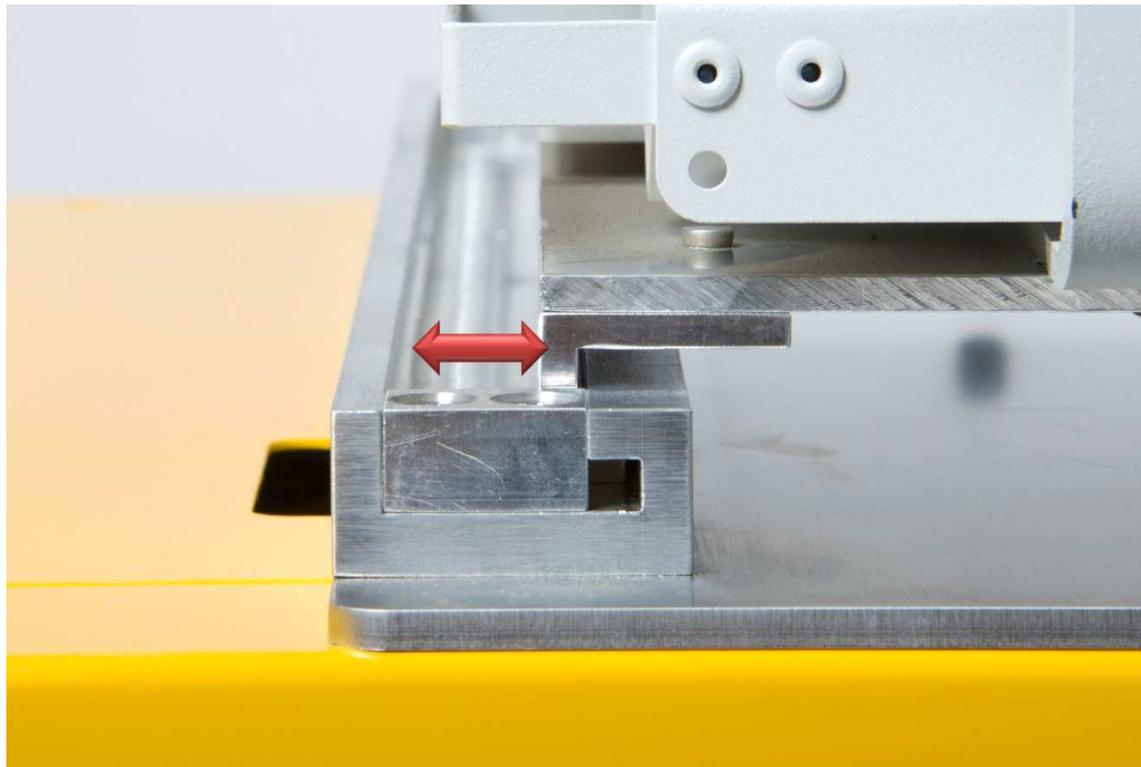

- Étape 3

Barrer l'incubateur sur la plaque

Pour barrer l'incubateur sur la plaque, il faut insérer la tige dans l'espace, en prenant soin de mettre le côté le plus long vers le haut

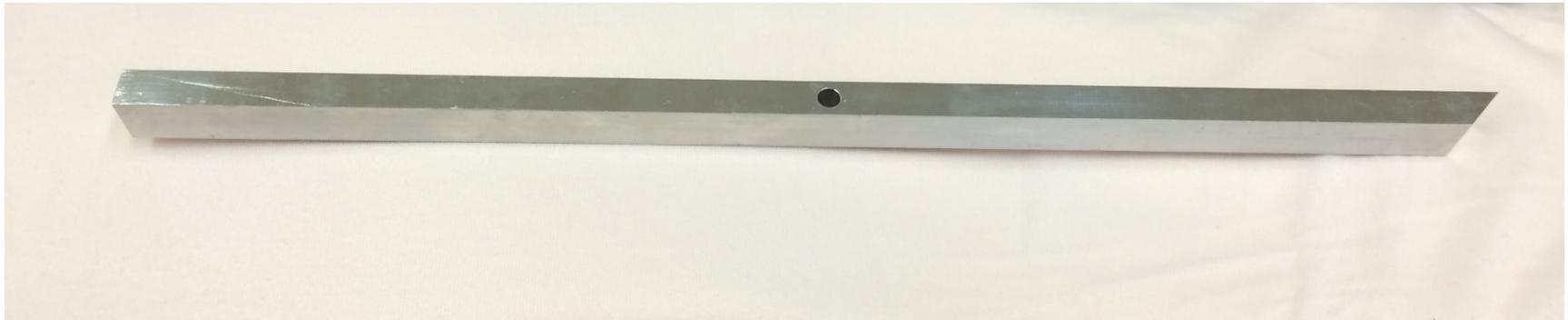


S'assurer que le trou au centre de la tige est bien aligné avec le trou de la gouttière fixée sur la plaque



Vue de haut



Puis insérer la contre-pin et s'assurer qu'elle est bien barrée

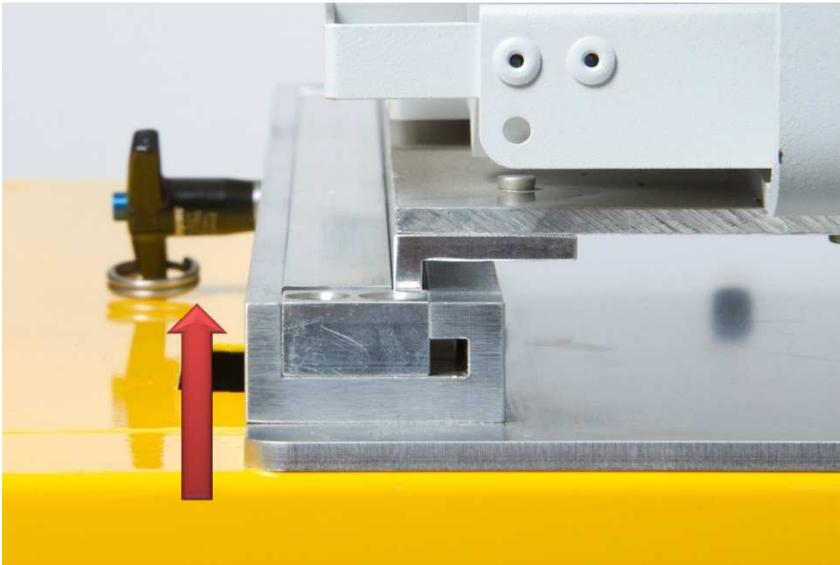

Fixation complète

